

内視鏡洗浄消毒器ESPAL 定期点検内容報告書

(お客様控)

お客様名 坂本内科消化器科 様 様 無償 / 有償
 機種 ESPAL-II 器械No. 12572 作業日 2020 年 2 月 6 日
 ご導入日 2015. 6. 28 作業者 生駒 寛

※確認結果が良ければ良とし、作業又は注意が必要な場合は内容を具体的に記すこと。

	点検内容	確認/作業内容		点検内容	確認/作業内容
1	給水ホース接続部および水道蛇口アタッチメントの確認	良	21	本体内部水漏れの確認	良
2	排水ホース接続部および先端位置の確認	良	22	セクリン吸引キャップの確認	交換
3	給排水ホースの折れ曲がりの確認	良	23	セクリン吸引パイプの密着度の確認	良
4	電源コンセントの差込状態の確認	良	24	セクリン吸引チューブの確認	交換
5	洗浄槽下部の移動障害の確認	良	25	ソケットハンガー取り付けビスの確認	良
6	洗浄槽移動時の音の確認	良	26	洗浄槽給排水チューブ内ろ過目板の詰まり確認	清掃
7	マニュアル給水時の給水速度の確認	良	27	上部センサーの汚れ確認	良
8	マニュアル給水時の気泡混入の確認	良	28	下部センサーの汚れ確認	良
9	水道水圧力の確認	良	29	洗浄槽内のブラシ清掃	良
10	マニュアル排水時の排水速度の確認	良	30	ゴミ取りストレーナーの清掃	清掃
11	給排水チューブの折れ曲がりの確認(ESPAL-b)		31	本体清掃	良
12	マニュアル給水・排水時のシャワー漏水の確認	良	日常作業の確認		
13	洗浄槽水位減少の確認	良	1	一次洗浄(用手洗浄)方法の確認	
14	洗浄槽下部残留水の確認	良	2	チャンネル内ブラシ清掃の確認	
15	シャワーの勢い確認	良	3	スコープ出し入れ時の取り扱い作業の確認	
16	シャワー穴目詰まりの確認	清掃	4	チャンネル洗浄アダプターの取り扱い確認	
17	チャンネル洗浄アダプター放出水の勢い確認	良	5	洗浄終了後のスコープ取り出し確認	
18	セクリン吸引量の確認	良	6	鉗子栓およびボタンの消毒確認	
19	シャワーボックスおよび洗浄槽接続部の水漏れ確認	良	7	セクリン使用状況(濃度管理)の確認	
20	外部配管チューブ(送気)の内部水漏れ確認	逆止弁交換	8	セクリン臭気の影響確認	

(お客様控)

ESPAL. III No. 12592

TEL : 052-762-0808 FAX : 052-761-9186