

2418329-007

Plessart ZERO 定期点検報告書 (3 回目)

A. ログブック控

実施日 2020 年 4 月 11 日

お客様名	塚本内科 消化器科	様	寝台名	DBX-2000H	契約期間	2020 年 1 月 1 日～ 2020 年 12 月 31 日	点検者	松浦 清一 千葉 丈
室名	レントゲン室		Ser No	AVB1375155				
			X線制御器名	KX0-32XP				
			Ser No	LNA1393100				



点 検 個 所	点 検 項 目	周期	ドキュメントNo	項目No.	方法	結果	点 検 個 所	点 検 項 目	周期	ドキュメントNo	項目No.	方法	結果	
DBX-2000A	起倒異常音および振動の確認	2/Y	2Y305-526JA	T-1	C	✓	DBX-2000A	圧迫力の確認	1/Y	2Y305-526JA	T-13	C	✓	
	整備項目	1/Y	2Y305-526JA	T-2	C	✓		最大力 Kg 保持力 Kg						
	減速機の油漏	1/Y	2Y305-526JA	T-3	C	✓		圧迫コーンカバーの交換	1/Y	2Y305-526JA	T-14	C	✓	
	整備項目	1/Y	2Y305-526JA	T-10	C	✓		安全スイッチの動作確認	1/Y	2Y305-526JA	T-4	C	✓	
	重要締結部の締付ペイントロック確認	1/2Y	2Y305-526JA	T-11	C	✓		セクタ支え用ローラ確認	1/Y	2Y305-526JA	T-5	C	✓	
	整備項目	1/Y	2Y305-526JA	T-12	C	✓		ラックレールのローラ走行面の確認	1/Y	2Y305-526JA	T-6	C	✓	
	天板左右動時の異常音の確認	1/Y	2Y305-526JA	T-15	C	✓		ボディーフレーム下部レール、ベアリングの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-7	C	✓	
	映像系上下動時の異常音	1/Y	2Y305-526JA	T-18	C	✓		ラックレールとピニオンの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-8	C	✓	
	整備項目	1/Y	2Y305-526JA	T-19	C	✓		セクタギアとピニオンの摩耗およびバックラッシュ	1/Y	2Y305-526JA	T-9	C	✓	
	上下動停止確認	1/Y	2Y305-526JA	T-20	C	✓		絞りの取付確認	1/Y	2Y305-526JA	T-41	C	✓	
	安全スイッチ動作確認	1/Y	2Y305-526JA	T-21	C	✓		HDR-08A/BR	アプリケーションの立ち上がりの確認	2/Y	2Y305-526JA	D1-1	C	✓
	映像系上下動駆動チェーンの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-22	C	✓			ログファイルの有無の確認	2/Y	2Y305-526JA	D1-2	C	✓
	圧迫操作レバーの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-24	C	✓	アプリケーションの動作および終了動作の確認		2/Y	2Y305-526JA	D1-3	C	✓	
	起倒スイッチの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-25	C	✓	ハードディスクのデフラグ		2/Y	2Y305-526JA	D1-5	C	✓	
	天板スライド／映像系上下動スイッチの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-26	C	✓	ファンの動作確認、清掃		2/Y	2Y305-526JA	D2-1	CL	✓	
	ループホースの確認	1/Y	2Y305-526JA	T-27	C	✓	モニタ、キーボード、マウスの清掃		2/Y	2Y305-526JA	D2-4	CL	✓	
	圧迫筒手動退避の動作確認	1/Y	2Y305-526JA	T-28	C	✓	総合		フットレストの固定確認	2/Y	2Y305-526JA	G-1	C	✓
	CU-BOX制御電源電圧の確認	1/2Y	2Y305-526JA	T-30	C	✓			操作卓の各 SW 動作およびランプ点灯	2/Y	2Y305-526JA	G-9	C	✓
	CU-BOX制御電源電圧の確認	1/2Y	2Y305-526JA	T-30	C	✓			イマーゼンシ SW の動作確認	2/Y	2Y305-526JA	G-14	C	✓
	エラーログの記録	1/Y	2Y305-526JA	T-31	C	✓			管球ロータ音の確認	2/Y	2Y305-526JA	G-17	C	✓
									モニタの清掃	2/Y	2Y305-526JA	G-20	CL	✓
									照射カウンタ TVBE1: 3667 TVBE2: 6629 2Y305-526JA*					

テスト UKB-ID0007

特 記 事 項		交 換 部 品 名	個 数
X線管球高圧フッシング部絶縁材シリコンプレートTV側、一般側交換	電源電圧	シリコンプレート(P5X11-0200B)	2
一般側照射野ランプ交換	入力200 : 207.3V	ランプ (AVL007-01)	1
制御器データ保持用バッテリー交換、PCデータ保持用バッテリー交換	出力100 : 107.0V	バッテリー (AVY005-01)	1
寝台駆動部清掃及び注油実施	出力+5 : +5.08V	バッテリー (AXB003X220)	1
X線出力確認 異常なし	出力+15 : +15.00V	グリッド	1
エラーログ確認 異常エラーなし	出力-15 : -14.99V	オイル	1
	出力+24 : +23.99V	クリーナ	1

方法 (確認: C 交換: R 清掃: CL) 結果 (正常: V 調整: A 交換: R 注油: G 特記事項: N)

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 (医) 塚本内科消化器科 様		宮城サービスセンタ 〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成2丁目17番2号 TEL 022-279-9639 FAX 022-279-0805				
お客様ID 24183290000-007	受付番号 5050997	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4123660101	

装置名 DREX-PZ10/51	設置室 レントゲン室	据付日 2013年9月24日
---------------------	---------------	-------------------

ご依頼内容 保守点検2020年04月/定期点検2020年04月		受付日 2020年1月1日		作業内容 定期点検報告書作業実施。 点検済み証 F264159 点検技術者 MRC-00050	
作業開始・終了時間					
開始	2020年4月11日12時00分				
終了	2020年4月11日16時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
0	8	4	12		
完了					

ユニット DREX-PZ10/51	製造番号 51A1392579	作業担当者 松浦 清一 他1名
----------------------	--------------------	--------------------

使用部品			数量
1	グリス	図番	1
2	LAMP	図番 AVL007-01	1
3	BATTERY \$	図番 AVY005-01	1
4	BATTERY	図番 AXB003*3V220	1
5	SILICON PLATE	図番 BSX11-0200E2/12	2

ご所属

ご署名

塚本和彦

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	01170141
------	----------